

## Einstellungen Kopplung zu „AJAT Panoramic Imaging Software“ (Fa. Hirschmann Instruments GmbH) – Kopplung über „TWAIN“

1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**
3. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**
4. Erforderliche Einträge in „AJAT Panoramic Imaging Software“
5. Test Bildübernahme in **ivoris® analyze** über „TWAIN“
6. Fehlermöglichkeiten

### 1. Voraussetzungen


- **ivoris®** und „AJAT“ müssen installiert sein

### 2. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**

- Diese Software muss über **ivoris® analyze** gekoppelt werden. Der entsprechende TWAIN-Treiber wurde nur dort getestet.

### 3. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**

- der für die Kopplung von AJAT zu **ivoris® analyze** zu nutzende TWAIN-Treiber muss über den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Kopplungen“ → „Bildquellen“ ausgewählt werden

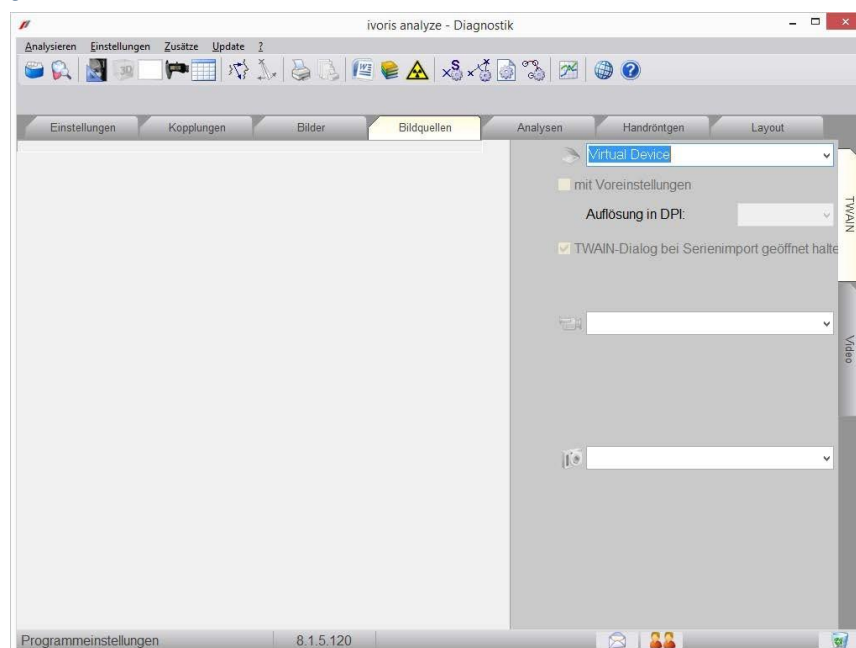


#### 4. Erforderliche Einträge in „AJAT Panoramic Imaging Software“


- es sind keine Einträge in AJAT erforderlich

#### 5. Test Bildübernahme von „AJAT“ in ivoris<sup>®</sup> **analyze** über „TWAIN“

- wechseln Sie in den Reiter „Bildaufnahme“
- die entsprechende „TWAIN“-Software wird über das Scanner-Symbol gestartet

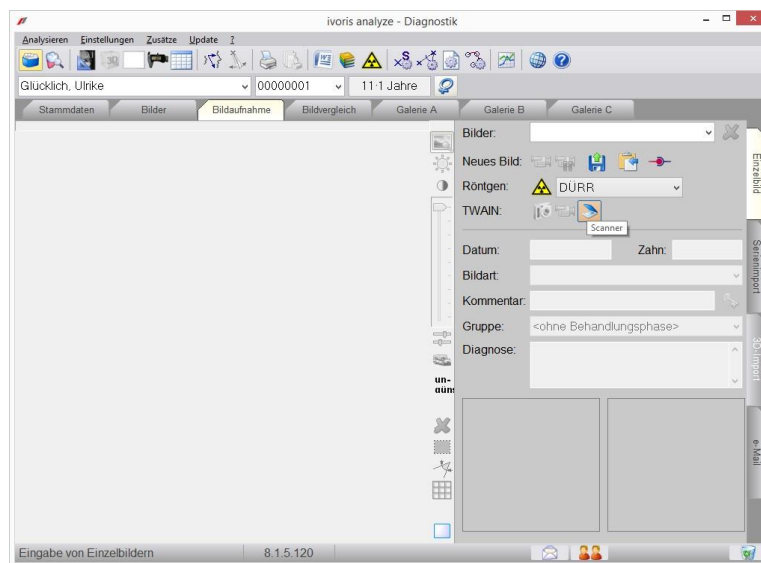

- über den Schalter „Save TWAIN Img“ (unten rechts) kann das neu aufgenommene Bild an ivoris<sup>®</sup> **analyze** übergeben werden

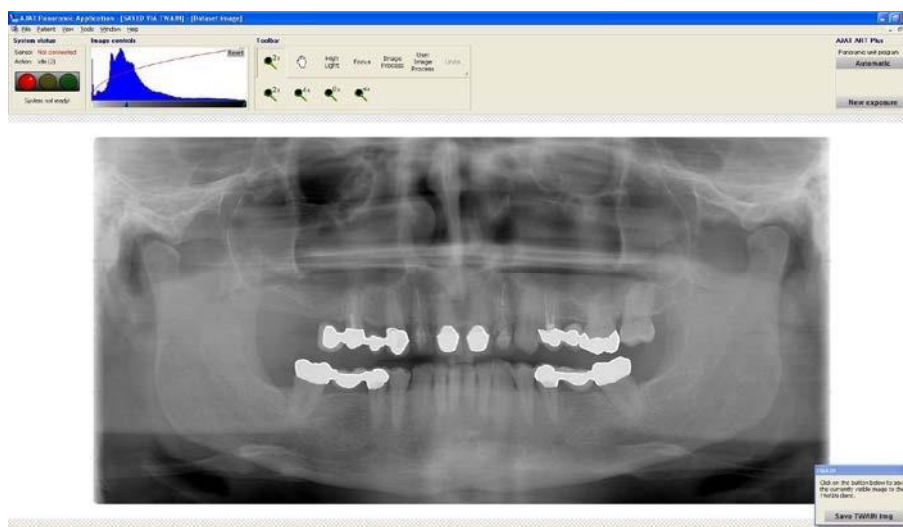

- Rückwechsel in ivoris<sup>®</sup> **analyze** über die Taskleiste – Das Bild wird in ivoris<sup>®</sup> **analyze** angezeigt. Datum und Bildart müssen noch angegeben werden.

## Fehlermöglichkeiten (5.)

Fehler	Ursache	Lösung
Scannersymbol in <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> nicht aktiv	TWAIN-Einstellung in <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> nicht erfolgt	Einstellung in <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> überprüfen
TWAIN-Software wird nicht gestartet	Problem mit TWAIN-Treiber oder Software schon gestartet	Rückfrage beim Hersteller von AJAT bzw. Hintergrundprozess beenden

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter [www.ivoris.de/agb](http://www.ivoris.de/agb).

Computer konkret AG  
DentalSoftwarePower  
Theodor-Körner-Straße 6  
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 7824-33  
Fax: 03745 7824-633  
info@ivoris.de  
www.ivoris.de

Vorstand  
Dipl.-Ing. Michael Brand  
Elisabeth Brand

Amtsgericht Chemnitz  
HRB 16107  
Steuer-Nr.: 223 100 00020  
USt.Id.-Nr.: DE 197042828

SEB Bank Frankfurt  
IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07  
BIC: ESSEDEFFXXX

praxis  
upgrade