



Stand: 08.2021

Einstellungen Kopplung zu "CliniView" (Fa. Instrumentarium Imaging)

- 1. Voraussetzungen
- 2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho
- 3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze
- 4. Erforderliche Einträge in "CliniView"
- 5. Test Patientenübergabe von ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho an CliniView
- 6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an "CliniView"
- 7. Test Bildübernahme in ivoris® analyze über "VDDS"
- 8. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- ivoris[®] muss installiert sein
- "CliniView" von der Fa. Instrumentarium Imaging muss installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

3. Erforderliche Einträge in ivoris[®] analyze

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

4. Erforderliche Einträge in "CliniView"

• es sind keine Einträge in "CliniView" erforderlich

Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an "CliniView"

 klicken Sie auf den Menüpunkt "Kopplungen" → "VDDS media", wählen Sie "CliniViewVDDS" und bestätigen Sie mit "OK"

Programmauswa	ihl			
STOMA-/KFO-W	/IN			
CliniViewVDDS				
	Ok	Abbruch	Hilfe	

VDDS-media Schnittstelle - Patientenübergabe

CliniView wird geöffnet und der Patient angemeldet



 wurden bei diesem Patienten zu einem fr
üheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, k
önnen diese sp
äter hier wieder aufgerufen werden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828

SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX





6. Test Patientenübergabe von ivoris[®] analyze an "CliniView"

klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDE	XIS DIMAXIS	DIGORA CL	INIVIEW DÜRR	TRO	PHY	
Patient						
Name:	Name: Glücklich		Numm	er: (0000001	
Vorname:	Ulrike		gebore	en: 3	31.07.1994	
Daten über	rgeben an					
STOMA-/KFO-WIN						
CliniViewVDDS						
						Hilfe
						Abbruch
						Ok

"CliniView" wird geöffnet und der Patient angemeldet



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX





7. Test Bildübernahme von CliniView in ivoris[®] analyze über "VDDS"

- Wählen Sie das "Icon "Datenverwaltung" und dort den Ordner "Bildaufnahme",
- wählen Sie auf der rechten Seite den "VDDS-Schalter"
- bei Klick auf "CliniViewVDDS" in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit "OK" importiert werden.

VDDS media Bildimport - Mandantennummer (PRXNR): 1

Bild holen aus Programm	Bildnummer	Datum	Art des Bildes	Kommentar
CliniViewVDDS				
	1	Ok	Abbruch	Hilfe

8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung	
Röntgenschalter von ivoris [®] ortho oder ivoris [®] analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul " digital " wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.	
CLINIVIEW nicht als VDDS- Client verfügbar in ivoris® analyze	VDDS-Client von CLINIVIEW nicht installiert	VDDS nachinstallieren	
CLINIVIEW nicht als VDDS- Client verfügbar in ivoris [®] analyze	Ältere Version von ivoris® analyze wird verwendet	Update fr-win 07.01.000x installieren Update auf ivoris[®] analyze installieren	

Mit freundlichen Grüßen Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX

