



Stand: 08.2021

Einstellungen Kopplung zu "CDIS" (Carestream - ehem. Kodak bzw. Trophy)

- 1. Voraussetzungen
- 2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho
- 3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze
- 4. Erforderliche Einträge in "CDIS"
- 5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an "CDIS"
- 6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an "CDIS"
- 7. Test Bildübernahme in ivoris® analyze über "VDDS"
- 8. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- **ivoris**[®] muss installiert sein
- "CDIS" und der "VDDS"-Medienschnittstellenserver von Kodak müssen installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

3. Erforderliche Einträge in ivoris[®] analyze

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





4. Erforderliche Einträge in "CDIS"

- es sind keine Einträge in "CDIS" erforderlich
- "CDIS" wird ohne Datenbank betrieben, die Originalbilder werden im "VDDS"-Verzeichnis gespeichert
- rechtsklicken Sie auf das "VDDS-Medienschnittstellen-Server" Symbol und wählen Sie "Konfigurieren"



• übernehmen Sie im Anschluss folgende Einstellungen:

	VDDS-Serve	er konfigurieren		
)atenbank				
Pfad zur aktuellen Datenba	ank			
C:\TWVDDS				
C Von d	lem aktuelle Benütser au	usgewählten Modus		
Fehlei	instellung Modus			
Kopiereinheit Optionen				
✓ Kopiereinheit verbesse	em	TIFF	: O JF	PEG
Von de la construcción de la	lem aktuelle Benütser au	usgewählten Modus		
C Fehlei	instellung Modus			
Patientenverwaltungsmodu	ul-Datenbank			
🔲 Zugriff zu den Bilder d	les Patientenverwaltung:	smoduls		
C Von d	le <mark>m aktuelle B</mark> enütser au	usgewählten Modus		
Fehlei	instellung Modus			
		ОК	Abbrechen	Obernehme

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





5. Test Patientenübergabe von ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho an "CDIS"

 klicken Sie auf den Menüpunkt "Kopplungen" → "VDDS media" und wählen Sie "Dental Imaging Software" und bestätigen Sie mit "OK"

VDDS-media Schni	ttstelle - Patient	enübergabe			
Programmauswa	hl				
STOMA-/KFO-W	IN				
Dental Imaging S	oftware				
	Ok	Abbruch	Hilf	е	

"CDIS" wird geöffnet und der Patient angemeldet



- wurden bei diesem Patienten zu einem fr
 üheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, k
 önnen diese sp
 äter hier wieder aufgerufen werden
- wird ivoris[®] analyze zur Bildanalyse verwendet, muss die Patientenübergabe direkt über dieses Diagnostikprogramm erfolgen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





6. Test Patientenübergabe von ivoris[®] analyze an "CDIS"

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste,
- wählen Sie "Dental Imaging Software"
- bestätigen Sie mit "Ok"

Röntgen	auftrag,	/Date	enabgleich						
VDDS	SIDE	XIS	DIMAXIS	DIGORA	CLINIVIEW	DÜRR	TR	OPHY	
Pati	ent								
Nam	ne:	Glü	cklich			Numm	er:	0000001	
Vorr	name:	Ulril	(e			gebore	n:	31.07.1994	
Date	n über	gebe	n an						
STO	MA-/K	FO-V	VIN						
Dent	ai ima	ging	Sonware						
									Hilfe
									Abbruch
L									Ok

"CDIS" wird geöffnet und der Patient angemeldet

🗣 CS Imaging Software - 7.0.3 - Glücklich Ulrike	-	ø ×
Datei Umgebung Format Qualitatssicherung Optionen Fenster ?		
A summeries C		
R		
	ñ. de) 🖭 🖪 🌖	11:53
	20.	10.2021

 wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese hier später wieder aufgerufen werden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





7. Test Bildübernahme von "CDIS" in ivoris[®] analyze über "VDDS"

- wählen Sie das Icon "Datenverwaltung" und dort den Ordner "Bildaufnahme"
- Wählen Sie auf der rechten Seite den "VDDS"-Schalter
- bei Klick auf "Dental Imaging Software" in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit "OK" importiert werden

VDDS media Bildimport - Mandantennummer (PRXNR): 1

Bild holen aus Programm	Bildnummer	Datum	Art des Bildes	Kommentar
Dental Imaging Software				
		Ok	Abbruch	Hilfe

8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung		
Röntgenschalter von ivoris [®] ortho oder ivoris [®] analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul " digital " wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.		
CDIS nicht als VDDS-Client verfügbar in ivoris® analyze	Ältere Version von ivoris[®] analyze wird verwendet	Update 07.01.000x installieren Update ivoris® analyze installieren		
CDIS nicht als VDDS-Client in ivoris[®] ortho oder ivoris[®] analyze verfügbar	VDDS-Client von CDIS nicht installiert	VDDS installieren		
CDIS startet nach Patientenübergabe nicht automatisch	Falscher Pfad zum CDIS Freigabeverzeichnis	Dieser muss mittels regedit.exe korrigiert werden: HKCU\Software\TROPHY\RJ Wert Path: <i>"\\SERVER\PFAD\"</i>		

Mit freundlichen Grüßen Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828

