



Stand: 08.2021

Einstellungen Kopplung zu "Romexis" (Fa. Planmeca)

- 1. Voraussetzungen
- 2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho
- 3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze
- 4. Erforderliche Einträge in "Romexis"
- 5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an "Romexis"
- 6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an "Romexis"
- 7. Test Bildübernahme in ivoris® analyze über "VDDS"
- 8. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- **ivoris**[®] muss installiert sein
- "Romexis" und die dazugehörige VDDS-Schnittstelle müssen installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

3. Erforderliche Einträge in ivoris[®] analyze

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

4. Erforderliche Einträge in Romexis

es sind keine Einträge in Romexis erforderlich





5. Test Patientenübergabe von ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho an "Romexis"

klicken Sie auf den Menüpunkt "Kopplungen" → "VDDS media", wählen Sie "Romexis" und bestätigen Sie mit "OK"

VDDS-media Schnittstelle - Patientenübergabe							
Programmauswahl							
STOMA-/KFO-WIN							
Romexis							
Ok Abbruch Hilfe							

"Romexis" wird geöffnet und der Patient angemeldet



wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein

Tel : 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand

Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828





6. Test Patientenübergabe von ivoris[®] analyze an "Romexis"

klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag/Datenabgleich												
VDDS	SIDE	XIS	DIMAXIS	DIGORA	CLINIVIEW	DÜRR	TR	OPHY				
Patie	ent											
Nam	ie:	Glüo	cklich			Numm	er:	00000	001			
Vorn	/orname: Ulrike			geboren: 31.07.1994								
Date	Daten übergeben an											
STOMA-/KFO-WIN												
Kom	ENIS											
												Hilfe
												Abbruch
L												Ok

• "Romexis" wird geöffnet und der Patient angemeldet

a Planne	a Romesis 2.7.0.0 16.05	11 - Publidge User (publidge)	Larensed to Planneca Dealer (MIT	KHI MI SALIT				-			_ioixi
								Clane Pallen	Glocklich Ulrike		• 0
	Al Patients DICOM We	what (DICOM QueryRettern) To	ind by troage								
	Find by Person ID +			nd Fast Assigned Saled	Clear Rebesh				Add Patient	Assign Patient Assignments	diactivade.
	Person ID	Last Harna	First Name	Date Of Birth	Age	Genter	Phone Hamber	Provider	Type	Assignments	
				PL							
(A)											
$ \mathbf{S} $											
	<u> </u>										

 wurden bei diesem Patienten zu einem fr
üheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, k
önnen diese hier sp
äter wieder aufgerufen werden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





7. Test Bildübernahme von Romexis in ivoris[®] analyze über "VDDS"

 das Icon "Datenverwaltung", dort den Ordner "Bildaufnahme" und auf der rechten Seite den "VDDS-Schalter" wählen



 bei Klick auf Romexis in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden

VDDS media Bildimport - Mandantennummer (PRXNR): 1							
Bild holen aus Programm	Bildnummer	Datum	Art des Bildes	Kommentar			
Romexis							
		Ok	Abbruch	Hilfe			

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828





8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung		
Röntgenschalter von ivoris [®] ortho oder ivoris [®] analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul " <mark>digital</mark> " wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.		
Romexis nicht als VDDSClient verfügbar in ivoris® analyze	Ältere Version von ivoris[®] analyze wird verwendet	Update 07.01.000x installieren Update ivoris[®] analyze installieren		
Romexis nicht als VDDSClient in ivoris[®] ortho oder ivoris[®] analyze verfügbar	VDDS-Client von Romexis nicht installiert	VDDS installieren		

Mit freundlichen Grüßen Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter www.ivoris.de/agb.

Computer konkret AG DentalSoftwarePower Theodor-Körner-Straße 6 08223 Falkenstein Tel.: 03745 7824-33 Fax: 03745 7824-633 info@ivoris.de www.ivoris.de

Vorstand Dipl.-Ing. Michael Brand Elisabeth Brand Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.Id.-Nr.: DE 197042828

