



Einstellungen Kopplung zu "Vixwin Platinum" (Fa. Gendex)

- 1. Voraussetzungen
- 2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho
- 3. Erforderliche Einträge in ivoris® analyze
- 4. Erforderliche Einträge in "Vixwin Platinum"
- 5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an "Vixwin Platinum"
- 6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an "Vixwin Platinum"
- 7. Test Bildübernahme in ivoris® analyze über "VDDS"
- 8. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen

- ivoris® muss installiert sein
- "Vixwin Platinum" muss installiert sein

2. Erforderliche Einträge in ivoris® dent, ivoris® ortho

• ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

Hinweis: Es darf keine Pfadvorsteuerung über "praxis-upgrade Administrator" → "ivoris Version 8.2…" → "Info" → "Einstellungen" vorgenommen werden. An der Arbeitsstation mit VixWin Kopplung muss dann als Dokumentenpfad das freigegebenen Netzlaufwerk mit der ivoris Installation (zB X:\Dokument) angegeben werden. Das Netzlaufwerk muss aus dem "Extras" Ordner der Installation bestehen.

3. Erforderliche Einträge in ivoris[®] analyze


ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird






4. Erforderliche Einträge in "Vixwin Platinum"

 die Datenbank von "Vixwin" muss ausgeschalten werden. Dafür muss unter "Funktionsmodus" die Option "Verknüpft (VDDS)" ausgewählt werden

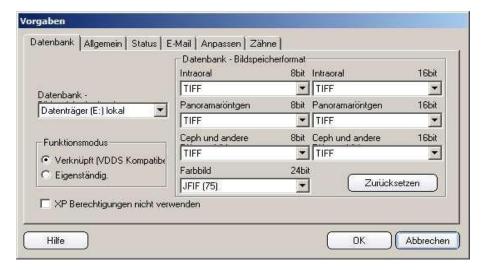

5. Test Patientenübergabe von ivoris® dent, ivoris® ortho an "Vixwin Platinum"

 klicken Sie auf den Menüpunkt "Kopplungen" → "VDDS media" und bestätigen Sie die Auswahl von "VixWin Platinum" mit "OK"

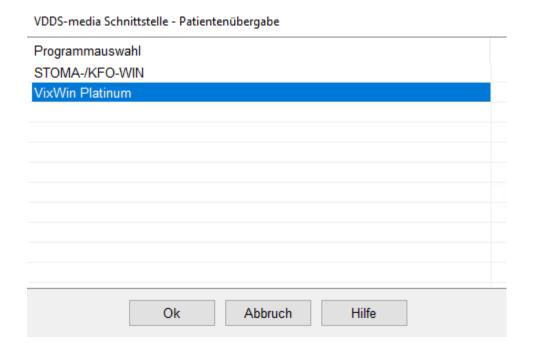




Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX




"Vixwin Platinum" wird geöffnet und der Patient angemeldet

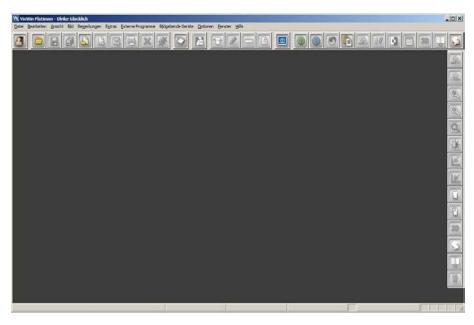

 wurden bei diesem Patient zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden

6. Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an "Vixwin Platinum"

· klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

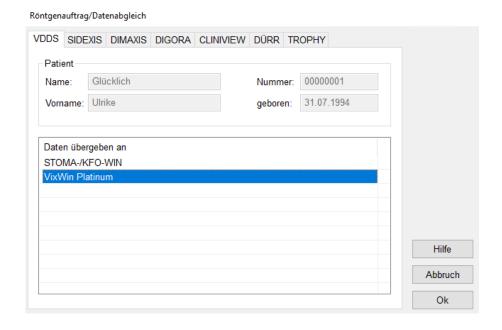




Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX




• "Vixwin Platinum" wird geöffnet und der Patient angemeldet.

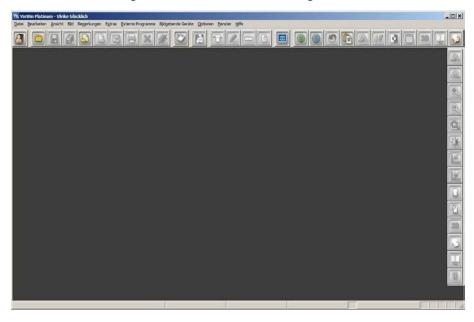

 wurden bei diesem Patient zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese hier später wieder aufgerufen werden

7. Test Bildübernahme von Vixwin Platinum in ivoris® analyze über VDDS

 Das Icon "Datenverwaltung" und dort den Ordner "Bildaufnahme" wählen und auf der rechten Seite den "VDDS-Schalter" wählen. Bei Klick auf Vixwin Platinum in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden.

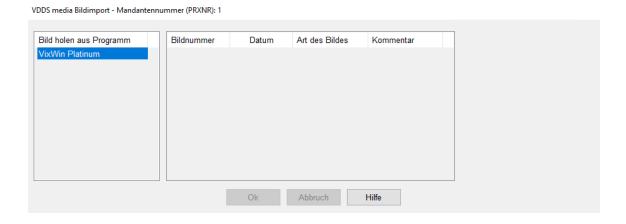



Amtsgericht Chemnitz HRB 16107 Steuer-Nr.: 223 100 00020 USt.ld.-Nr.: DE 197042828 SEB Bank Frankfurt IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07 BIC: ESSEDEFFXXX



8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenschalter von ivoris® ortho oder ivoris® analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul " <mark>digital</mark> " wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Vixwin Platinum nicht als VDDS-Client verfügbar in ivoris® analyze	Ältere Version von ivoris® analyze wird verwendet	Update 07.01.000x installieren Update auf ivoris® analyze installieren
Vixwin Platinum nicht als VDDS-Client in ivoris® ortho oder ivoris® analyze verfügbar	VDDS-Client von VixWin Platinum nicht aktiviert	VDDS aktivieren

Mit freundlichen Grüßen Ihr Serviceteam der Computer konkret AG