

Einstellungen Kopplung zu Vixwin Platinum (Fa. Gendex)

1. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**
2. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**
3. Erforderliche Einträge in Vixwin Platinum
4. Test Patientenübergabe von **ivoris® dent**, **ivoris® ortho** an Vixwin Platinum
5. Test Patientenübergabe von **ivoris® analyze** an Vixwin Platinum
6. Test Bildübernahme in **ivoris® analyze** über VDDS
7. Fehlermöglichkeiten

Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho** (1.)


- Ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird.
- Vixwin Platinum und die zugehörige VDDS-Schnittstelle müssen auf dem Rechner installiert sein.

Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze** (2.)

- Ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird.
- Vixwin Platinum und die zugehörige VDDS-Schnittstelle müssen auf dem Rechner installiert sein.


Erforderliche Einträge in Vixwin Platinum(3.)

- Die Datenbank von Vixwin muss ausgeschaltet werden. Dafür muss unter „Funktionsmodus“ die Option „Verknüpft (VDDS)“ ausgewählt werden.

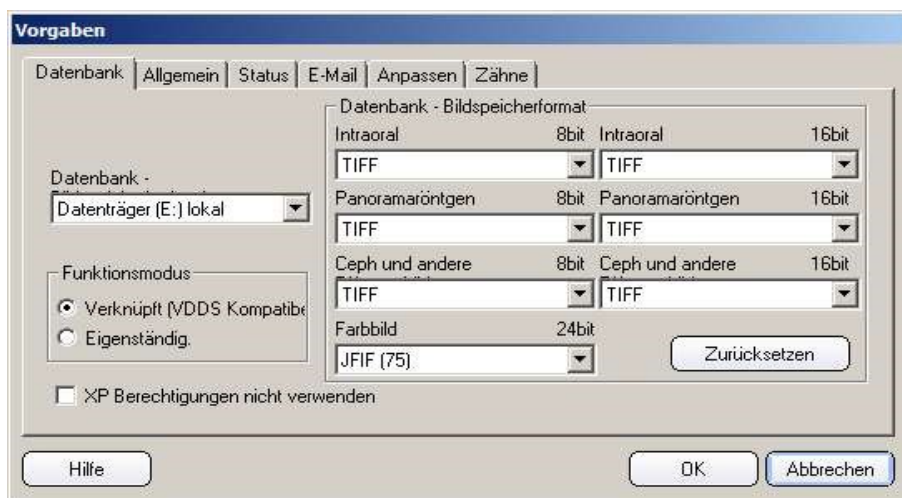


Test Patientenübergabe von ivoris®dent, ivoris®ortho an Vixwin Platinum (4.)

- Klick auf den Menüpunkt „Kopplungen/VDDS media“ und die Auswahl von Vixwin Platinum für Windows mit OK bestätigen

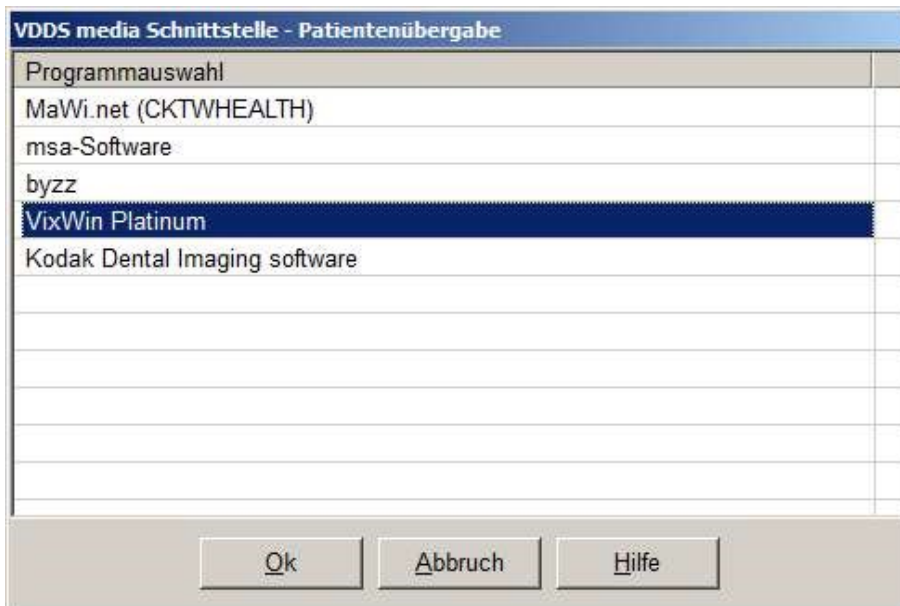


- Vixwin Platinum wird geöffnet und der Patient angemeldet

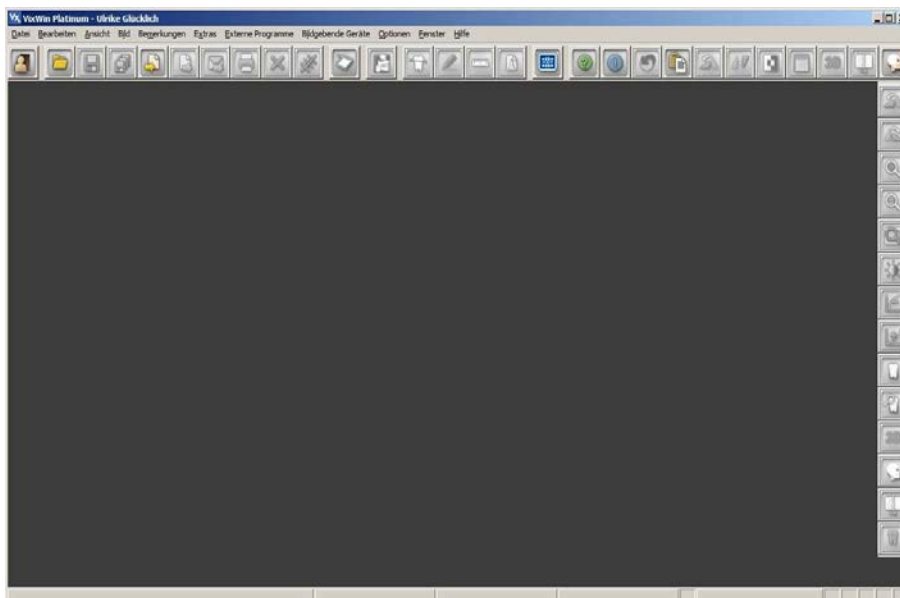


- Wurden bei diesem Patient zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden.

Test Patientenübergabe von ivoris® analyze an Vixwin Platinum (5.)

- Klick auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

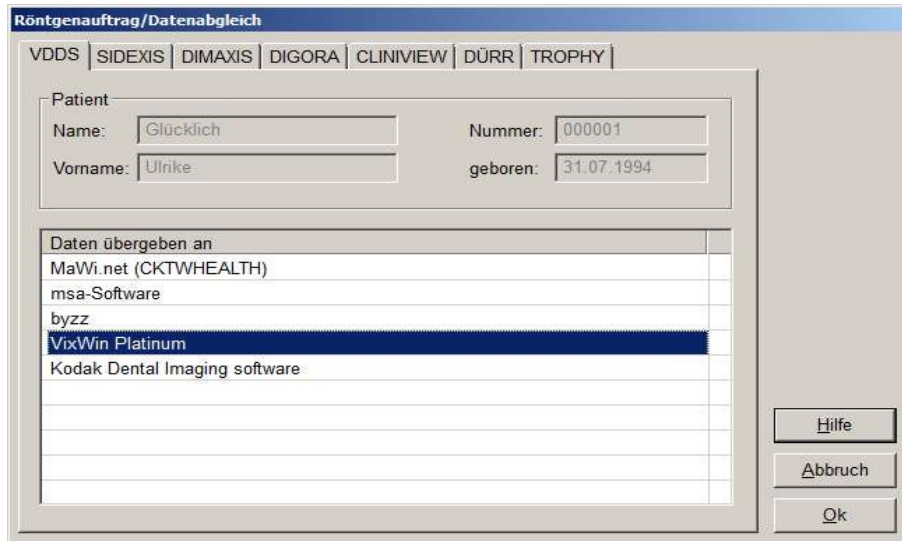

- Vixwin Platinum wird geöffnet und der Patient angemeldet.

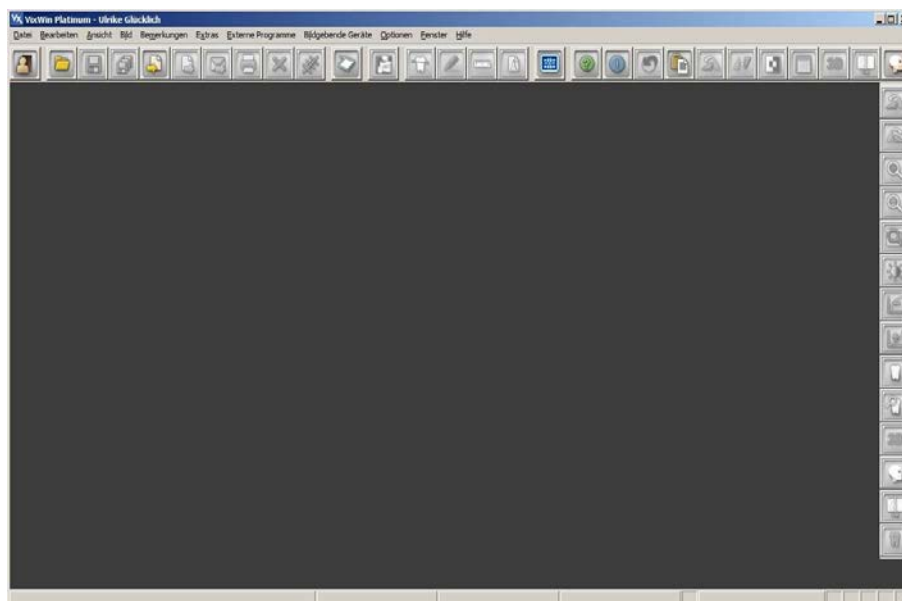

- Wurden bei diesem Patient zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese hier später wieder aufgerufen werden.

Test Bildübernahme von Vixwin Platinum in ivoris® analyze über VDDS (6.)

- Das Icon „Datenverwaltung“ und dort den Ordner „Bildaufnahme“ wählen und auf der rechten Seite den „VDDS-Schalter“ wählen. Bei Klick auf Vixwin Platinum in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden.



Fehlermöglichkeiten (7.)

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenschalter von ivoris® ortho oder ivoris® analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul „digital“ wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Vixwin Platinum nicht als VDDS-Client verfügbar in ivoris® analyze	Ältere Version von ivoris® analyze wird verwendet	Update 07.01.000x installieren Update auf ivoris® analyze installieren
Vixwin Platinum nicht als VDDS-Client in ivoris® ortho oder ivoris® analyze verfügbar	VDDS-Client von Vixwin Platinum nicht aktiviert	VDDS aktivieren

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG